

Kurzanleitung Antigen-Selbsttest

Produkt: CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test
Hersteller: Siemens Healthineers



Vorbereitung

1

Verschlussfolie vom Röhrchen entfernen und Röhrchen in eine Halterung stellen (z. B. Klammer)




Probennahme (bei Zimmertemperatur)

2

Abstrichtupfer nacheinander in beide Nasenlöcher ca. 2-4 cm einführen, jeweils fünfmal gegen die Naseninnenseite drehen

Den Tupfer nicht tiefer einführen, wenn Widerstand spürbar ist

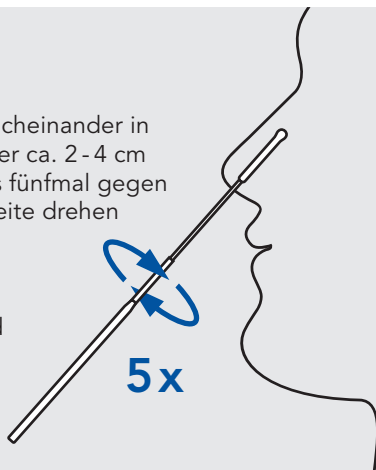

Probenbehandlung

3

mind. 6x

Abstrichtupfer in das Röhrchen einführen, mindestens sechsmal drehen und dabei gegen die Röhrchenwand drücken



Probenbehandlung


4



Abstrichtupfer eine Minute im Röhrchen stehenlassen

5

Röhrchen mehrmals gegen Tupfer zusammendrücken

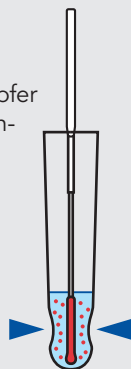

6

Abstrichtupfer entnehmen und dabei Röhrchen zusammendrücken, um Flüssigkeit vom Tupfer abzustreifen


Anschließend Tropfkappe fest aufsetzen



7

Vier Tropfen in Probenvertiefung auf der Testkassette geben

4x

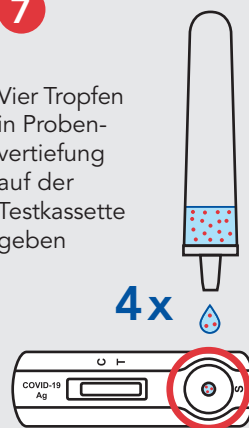

8




Ergebnis ablesen
nach 15 min

Sind mehr als 20 Minuten vergangen, ist der Test ungültig und muss wiederholt werden

Auswertung Testergebnis

Entsorgung

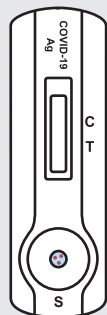

Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten



Negativ

Farbige Kontrolllinie (C)



keine Infektion nachweisbar



Positiv

Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)



Verdacht auf Infektion: PCR-Test erforderlich



Ungültig / unklar

Keine Kontrolllinie (C)



Test wiederholen



Verwendete Testkits in einem verschlossenen Beutel im Hausmüll entsorgen